




Atrauman® Salvekompres

Ved bindingskift er der en risiko for, at sårfladen rives op igen og igen. Dette forårsager smerte, som kan føre til en uvilje hos patienten mod at få skiftet binding. For at hindre dette anvendes Atrauman salvekompres, som kan kombineres med flere forskellige bindingstyper for at undgå fastvoksning i såret. Atrauman indeholder triglycerider, som beskytter såret mod udtørring samt forhindrer skorpedannelse. Gennem sit finmaskede net tillader salvekompresset væske at trænge igennem fra såret og op i den sekundære binding.

Mange anvendelsesområder

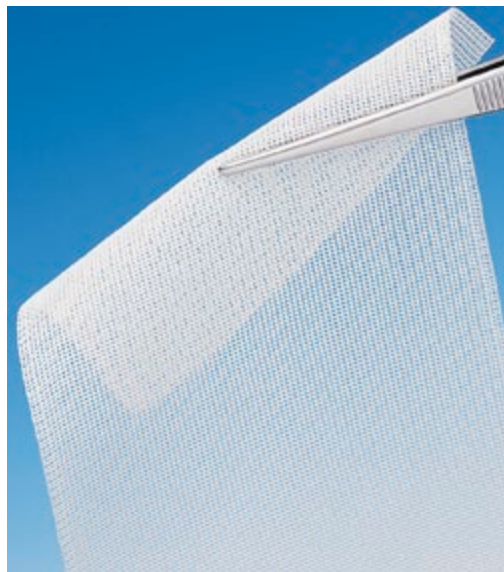

Beskytter sårkanterne

Forhindrer fastvoksning



Indikation

Til atraumatisk sårbehandling i alle faser af sårhelingen ved f.eks. hudafskrabninger, bensår, tryksår, forbrændinger, strålingsskader, abscesser, hudtransplantationer og ved negleekstraktioner.

Kontraindikationer:

Ingen kendte.



helps healing.

PAUL HARTMANN A/S
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.
Center Boulevard
2300 København
Tlf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01
E-mail info@dk.hartmann.info

Besøg os på vores hjemmeside:
www.dk.hartmann.info

Atrauman er et salvekompres, som støtter sårhelingen effektivt i alle dens faser.

Egenskaber

Det tynde, bløde gittervæv af hydrofobe polyesterfibrer har en glat yderstruktur, som forhindrer, at nydannet væv vokser ind i kompresset. Således modvirkes tendensen til fastvoksning i såret. Ingen salverester efterlades i såret, hvilket letter rensningen og vurderingen af sårets tilstand.

Atrauman holder sårfladen og sårkanterne smidige og beskytter såret mod udtørring.

Salvemassen er gennemtrængelig for både luft og sekreter, hvilket sikrer, at overskydende sekret hurtigt ledes bort fra såret. For at absorbere overskydende sekret bør der lægges en absorptionsforbinding i kombination med Atrauman.

Da salvemassen er helt neutral uden brug af aktive lægemidler, kan kompresset endda også benyttes indenfor dermatologien, samt til patienter, der lider af overfølsomhed overfor lægemidler eller af sensibel hud. Efter lægeordination kan terapeutisk virksomme salver tilsættes.

Atrauman bør skiftes ved hvert forbindingskift, såfremt lægen ikke ordinerer andet.

Materiale

Hydrofobt polyestergittervæv, imprægneret med en neutral salvemasse. Salven indeholder: Fedtsyrer(triglycerider) og kokosolie(Caprylic/Capric/Stearic Triglyceride; Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2(analog INCI)). Salven er ikke sensibiliserende og indeholder hverken vaseline, lanolin eller parafin.

Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse IIb, steril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.



Atrauman applikeres på en hudafskrabning.



Den finmaskede netstruktur i Atrauman.

Tips

Da Atrauman ikke hæfter på huden, så kan det være vanskeligt at fiksere kompresset f.eks. på undersiden af benet. Det nemmeste er derfor først at lægge salvekompresset på sekundærforbindingen og derefter aplikere begge på såret.

Hvis der ikke er behov for en sekundær forbinding, så kan salvekompresset evt. fikseres med et gazebind.

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Antal pr. æske	Karton
Atrauman.	5 x 5 cm	499 510	10 stk	20 Æsker
Steril, pakket enkeltvis	7,5 x 10 cm	499 513	10 stk	10 Æsker
	10 x 20 cm	499 536	30 stk	10 Æsker
	5 x 5 cm	499 550	50 stk	10 Æsker
	7,5 x 10 cm	499 553	50 stk	10 Æsker

Fordele:

Lindrer smerte

Ingen risiko for fastvoksning

Blød og komfortabel

Økonomisk

Beskytter såret

Mange anvendelsesområder

Plejer sårkanterne