

Cambren® C

Antiembolistrømper

Cambren C er en antiembolistrømpe af høj kvalitet. Ved hjælp af strømpen kan en sikker tromboseprofylakse udføres på immobile patienter uden den store plejeindsats. Den yder jævn kompression, som gradvis falder fra vristen op mod låret.

Cambren C findes i 16 størrelser



Cambren C yder en jævn kompression, som gradvis falder fra vristen op mod låret

Strømpen har lukket tå med inspektionshul



Indikation

Til pre-, intra- og postoperative trombose- og emboliprofylakse hos immobile patienter.

Kontraindikationer:

Venøse bensygdomme, som kræver medicinsk behandling. Arterielle cirkulationsforstyrrelser. Fikserede, lokale bensygdomme, f.eks. skader og hudsygdomme ligesom ekstreme benproportioner.



helps healing.

PAUL HARTMANN A/S
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.
Center Boulevard
2300 København
Tlf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01
E-mail info@dk.hartmann.info

Besøg os på vores hjemmeside:
www.dk.hartmann.info

Egenskaber

Med Cambren C får man en jævn kompression, som gradvis falder fra vristen op mod låret. Trykket er ca. 18 mmHg ved vristen og 6 mmHg ved låret. Trykket bevirker, at blodgennemstrømningen øges hos immobile patienter og fremmer tilbageløbet af blod til hjertet.

Strømpen har lukket tå med inspektionshul. Hver strømpe har en mærkning, som tydeligt indikerer størrelsens lægomfang. Hælen er strikket for at sikre den bedst mulige pasform.

De lårlange størrelser har et elastisk fikseringsbånd, som hindrer, at strømpen ruller og glider ned på låret.

De hoftelange strømper har en indstillelig elastisk knaplukning rundt om taljen samt en kile på indersiden af hvert ben for at sikre den bedste pasform.

Cambren C findes i 16 størrelser, hvilket gør det muligt at finde frem til den optimale pasform samt sikre den bedste terapeutiske effekt for hver patient. Strømpen sidder stramt om benet, danner ingen folder eller efterlader nogen mærker på huden.

Der findes to farvemærker på strømpen, en ved kanten af inspektionshullet og en under fikseringsbåndet. Formålet med disse er, at man nemt skal kunne identificere strømpens størrelse. I nedenstående tabel er farvemærkerne på de forskellige strømper angivet.

Materiale

Materialet i Cambren C er åndbart og velegnet selv til patienter med følsom hud.

Cambren C er latexfri.

Strømperne består af 82% Polyamid og 18% Elastan, og fikseringsbåndet indeholder Polyamid, Elastan og Silikone.

Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse 1, usteril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

Vaskeråd

Cambren C kan både vaskes og koges.

Table with columns: Sortiment, Varenr, Str. Tå, Lægomfang, Ben -inderlængde, Låromfang, Antal pr. æske, Karton. Rows include Knælang, Lårlang (SK= Lår lille, SM= Lår medium, SG= Lår stor), and Hoftelang.

Fordele:

Findes i 16 størrelser

Yder jævn kompression

Latexfri

Hurtig og enkel i brug

Høj brugerkomfort