



Hydrofilm®

Transparent sårfilm

Efter et kirurgisk indgreb er det nødvendigt at beskytte suturerne mod ydre kontaminering, samtidig skal der ske en optimal he-
ling, og sårinspektion skal let kunne udføres. Hydrofilm er en selvhæftende transparent filmforbinding. Hydrofilm giver mulighed
for en effektiv sårpleje samtidig med, at den er hudvenlig og enkel at håndtere.

Vandtæt og uigennem-
trængelig for bakterier



Transparent

Åndbar



Indikation

Anvendes som postoperativ og primærfor-
binding for at beskytte sår, som ikke væsker
eller som fiksering. F.eks. til kateter- og
kanylefikseringer, som sekundærforbinding
over geler og kalciumalginater eller som
beskyttelse mod mekanisk irritation.

Kontraindikationer:

Hydrofilm må ikke anvendes på inficerede,
blødende eller væskende sår.



helps healing.

PAUL HARTMANN A/S
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.
Center Boulevard
2300 København
Tlf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01
E-mail info@dk.hartmann.info

Besøg os på vores hjemmeside:
www.dk.hartmann.info

Hydrofilm er en selvhæftende, transparent filmforbinding. Filmen består af tynd vandtæt polyuretan, som endda kan modstå bakterier og vira. Forbindingen er åndbar og har en klæber, som er dermatologisk testet.

Egenskaber

Takket være den tynde transparente film kan såret holdes under observation, uden at man behøver at skifte forbindingen. Denne egenskab gør, at man ikke behøver at forstyrre såret unødigt under helingsprocessen.

Eftersom Hydrofilm holder både vand og bakterier ude, minimeres risikoen for sekundærinfektioner. Det er således også muligt at tage bad og brusebad.

Filmen har en mat overflade, som ikke reflekterer lys, hvilket gør, at filmen ikke så let bemærkes.

Hjørnerne på Hydrofilm er rundede, for at forbindingen skal blive siddende på plads. Klæberen i filmforbindingen har en kraftig hæfteevne, således at forbindingen kan blive siddende på plads i længere tid. Anvendelsestiden afhænger af sårtypen og dets tilstand.

Filmen har en meget tydelig fikseringsinstruktion. Ved at følge nummereringen fra 1-4 kan forbindingen fikseres på enkel vis. Filmforbindingen lader sig udmærket applikere med handsker på.

Materiale

Polyuretanfilm med hypoallergen klæber af akrylat. Kolofoniumfri. Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse IIa, steril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.



Fikseringsinstruktioner

Huden skal være tør, når filmen fikseres.

Tips

Praktiske råd om, hvordan man fjerner en filmforbinding smertefrit, kan bestilles.

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Antal pr. æske	Karton
Hydrofilm®	6 x 7 cm	685 755	10 stk	20 Æsker
Steril, pakket enkeltvis	10 x 12,5 cm	685 757	10 stk	20 Æsker
	10 x 15 cm	685 759	10 stk	10 Æsker
	15 x 20 cm	685 761	10 stk	10 Æsker
	20 x 30 cm	685 765	10 stk	10 Æsker
	10 x 25 cm	685 763	25 stk	10 Æsker
	12 x 25 cm	685 764	25 stk	10 Æsker
	10 x 15 cm	685 760	50 stk	10 Æsker
	15 x 20 cm	685 762	50 stk	10 Æsker
	6 x 7 cm	685 756	100 stk	10 Æsker
	10 x 12,5 cm	685 758	100 stk	10 Æsker

Fordele:

Sikker sårbeskyttelse

Enkel håndtering

Kolofoniumfri

Dermatologisk testet

Transparent