




# Hydrosorb®/Hydrosorb® comfort

## Transparent gelforbinding

Ved behandling af tørre kroniske sår fungerer Hydrosorb som en blødgører, opløser og absorberer eventuelt nekrotisk væv. Når eksudatet indkapsles i forbindingen, skabes der et bedre helingsmiljø for såret. Det fugtige miljø som skabes, giver de nydannede celler mulighed for at brede sig til hele såroverfladen og udvikle nyt væv. Forbindingen er blød, smidig og behagelig for patienten at have på.

Hydrosorb comfort har en bred klæbekant for at lette fikseringen

Absorberer sin egen vægt på 48 timer

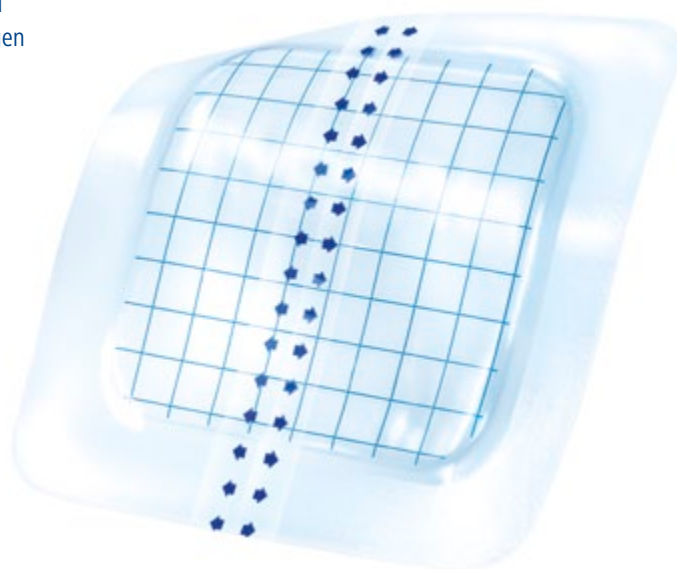

Består af 60% vand



### Indikation

Til behandling af kroniske sår med en ringe helingsfrekvens og lille eksudatmængde, f.eks. bensår og tryksår. Kan også anvendes ved 2. grads forbrændinger og ved hudtransplantationer. Fungerer som blødgører og opløser nekrotisk væv.

#### Kontraindikationer:

Bør ikke anvendes i tilfælde af klinisk infektion eller ved 3. grads forbrændinger.



helps healing.

PAUL HARTMANN A/S  
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.  
Center Boulevard  
2300 København  
Tlf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01  
E-mail info@dk.hartmann.info

Besøg os på vores hjemmeside:  
[www.dk.hartmann.info](http://www.dk.hartmann.info)

Hydrosorb er en transparent gelforbinding dækket af en semipermeabel bakterie- og vandtæt folie

### Egenskaber

Hydrosorb skaber et fugtigt sårmiljø og er velegnet til behandling af kroniske sår. I granulationsfasen fremmer Hydrosorb dannelsen af nyt væv. Med Hydrosorb kan det fugtige sårmiljø opretholdes endda i længere behandlingsperioder. Forbindingen kan blive siddende på plads i op til 7 dage afhængig af sårets tilstand.


I epiteliseringsfasen fremmer Hydrosorb celledelingen og celernes spredning gennem det fugtige sårmiljø. Hydrosorb opløser og absorberer nekrotisk væv.

Forbindingen kan skiftes uden at irritere det nye væv og desuden helt smertefrit for patienten, da den ikke fæstner i såret. Da Hydrosorb er transparent, kan såret nemt inspiceres uden forbindelsesskift. Gennem gelens bløde elastiske egenskaber har Hydrosorb desuden en god polstringseffekt, som beskytter såret fra ydre påvirkning.

### Materiale

Hydrogelforbinding dækket med lag af semipermeabel polyuretanfilm. Hydrogelen er lavet af polyuretan i matrixstruktur, som indeholder ca. 60% vand. Hydrosorb komfort har en akrylatbaseret klæber.

Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse IIb, steril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

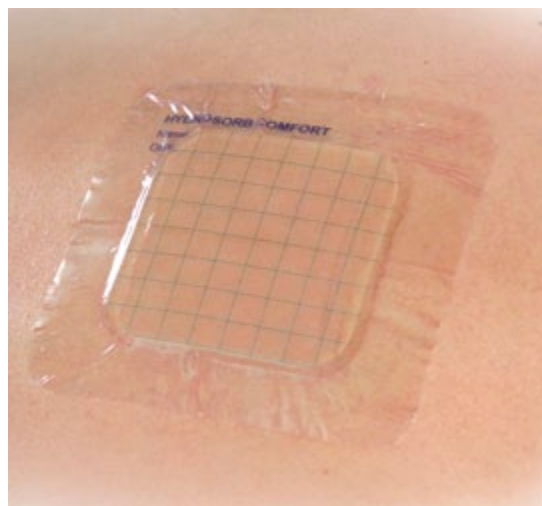

Hydrosorb Comfort

### Tips

Til fiksering af Hydrosorb anbefales det at bruge fikseringsbind eller tape. Hydrosorb komfort har derimod en klæbekant, som på enkel vis holder forbindingen på plads.

Hydrosorb har en transparent dokumentationsfilm, som gør det muligt nemt at følge sårets heling.

Her kan navn, dato og sårstørrelse nemt markeres og hurtigt og enkelt overføres til patientens journal.

| Sortiment                 | Størrelse      | Varenr. | Antal pr. æske | Karton   |
|---------------------------|----------------|---------|----------------|----------|
| <b>Hydrosorb.</b>         | 5 x 7,5 cm     | 900 853 | 5 stk          | 6 Æsker  |
| Steril, pakket enkeltvis  | 10 x 10 cm     | 900 854 | 5 stk          | 6 Æsker  |
|                           | 20 x 20 cm     | 900 855 | 3 stk          | 5 Æsker  |
| <b>Hydrosorb. komfort</b> | 4,5 x 6,5 cm   | 900 702 | 5 stk          | 12 Æsker |
| Steril, pakket enkeltvis  | 7,5 x 10 cm    | 900 706 | 5 stk          | 6 Æsker  |
|                           | 12,5 x 12,5 cm | 900 723 | 5 stk          | 6 Æsker  |

### Fordele:

Oprensende

Enkel håndtering

Blød og komfortabel

Beskytter såret

Integreret dokumentation