


Hydrosorb® Gel

Oprensende gel

Hydrosorb Gel er en klar langsomtflydende gel baseret på Ringer-opløsning og glycerin. Gelen fremmer en autolytisk rensning af såret. Man kan sige, at den stimulerer såret til at rense sig selv ved at opretholde et fugtigt miljø i såret. Når gelen fjernes, så følger det opløste eksudat med. Hydrosorb Gel kan kombineres med alle typer forbinding.

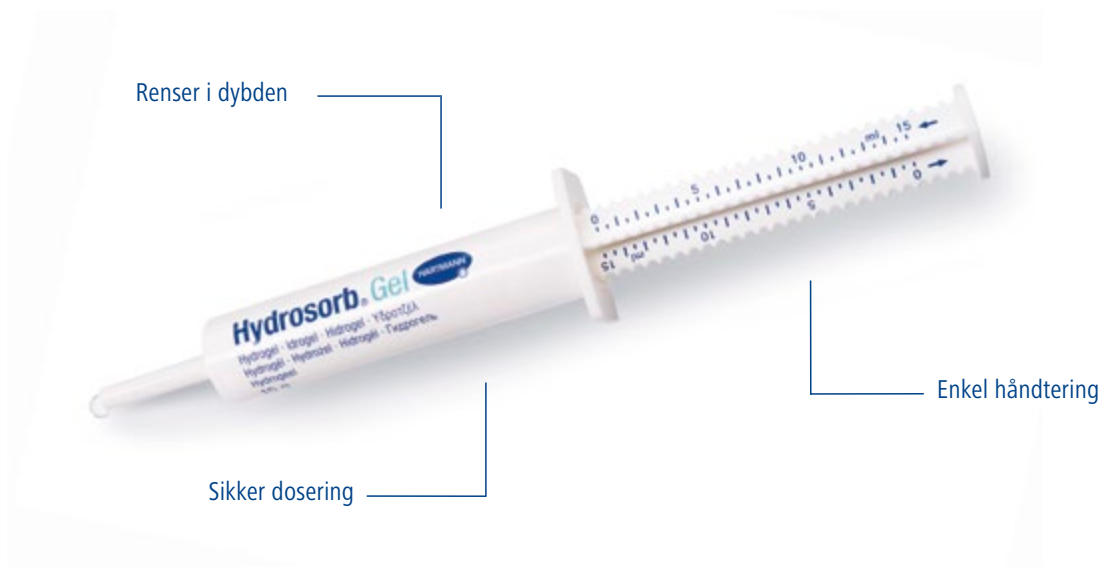

Indikation

Til autolytisk rensning af overfladiske og dybe sår med en lav eksudatmængde f.eks. bensår, tryksår og brandsår op til 2. grads forbrændinger.

Kontraindikationer:

Der bør udvises forsigtighed ved dybe sår med smalle åbninger af typen fistler, eftersom det efterfølgende kan være svært at fjerne gelen.



helps healing.

PAUL HARTMANN A/S
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.
Center Boulevard
2300 København
Tlf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01
E-mail info@dk.hartmann.info

Besøg os på vores hjemmeside:
www.dk.hartmann.info

Hydrosorb Gel er en klar langsomtflydende gel baseret på Ringeropløsning og glycerin.

Egenskaber

Sprøjten sikrer en helt passende dosering. Gelen applikeres direkte i såret uden spild og i den rette mængde, og således minimeres risikoen for, at noget går galt.

Hydrosorb Gel giver mulighed for en hurtig sårrensning takket være sin hydroaktive effekt. Gelen kan kombineres med alle mulige forskellige forbindelsestyper og minimerer smerten ved forbindelsesskift. Både den mængde gel, som er applikeret i såret, og den mængde, som er tilbage i sprøjten, kan nemt aflæses på de to skalaer på sprøjten. Da det er så enkelt at håndtere sprøjten og dosere den rette mængde, er Hydrosorb Gel tidsbesparende. Til forskel fra tuber, hvor gelen har en tendens til at blive i folderne og kanterne, kan sprøjten med Hydrosorb Gel tømmes fuldstændigt. Det er også nemt at lukke sprøjten til, hvis behandlingen af en eller anden grund afbrydes.

Materiale

Gel: Hydroxyethylcellulose (HEC), Carboxymethylcellulose (CMC), Carbomer (stivelsesmiddel, syntetisk polymer).

Væske: Ringeropløsning

Blødgører: Glycerin

Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse IIb, steril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.



Tips

Ved anvendelse af gelen skal såret dækkes med et 5 mm tykt lag gel og dækkes med en passende forbindelse.

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Antal pr. æske	Karton
Hydrosorb® gel	8 g	900 843	5 stk	10 Æsker
Steril, pakket enkeltvis	15 g	900 844	10 stk	10 Æsker

Fordele:

Sikker dosering

Fleksibel og smertefri

Letter dokumentationen

Enkel håndtering, tidsbesparende

Økonomisk